

Návod na synchronizaci dat mezi software a aplikací Veroval medi.connect

Stáhněte si prosím naši aplikaci Veroval® medi.connect EKG & BP z AppStore nebo PlayStore na vašem chytrém telefonu/tabletu.





1. Data z počítače můžete synchronizovat do chytrého telefonu nebo tabletu.




- Na svém chytrém telefonu / tabletu otevřete aplikaci Veroval® medi.connect, zadejte svůj e-mail a heslo (stejně jako u verze softwaru) a klikněte na *Přihlášení*.


- Z bezpečnostních důvodů obdržíte e-mail pro potvrzení mobilního zařízení. Potvrďte prosím své mobilní zařízení v tomto e-mailu.

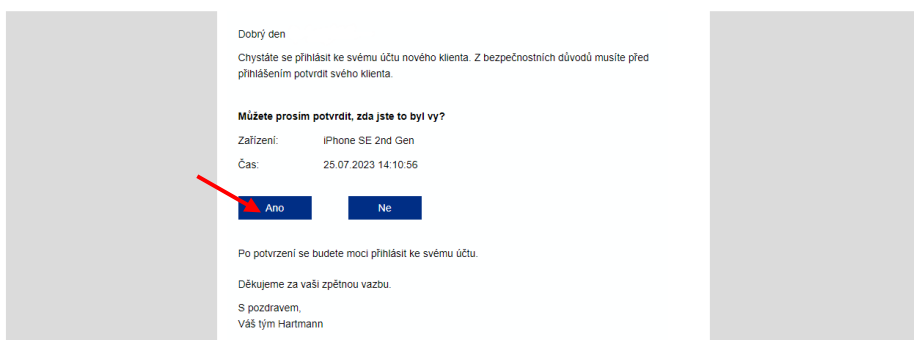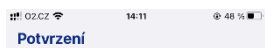

- Poté, co vaše mobilní zařízení potvrdíte, můžete se přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla. Budete požádáni o udělení souhlasu.

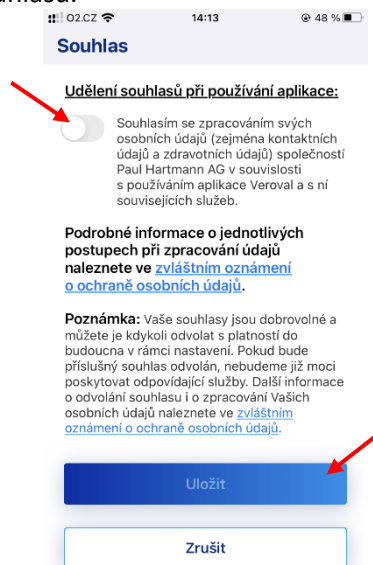

- Nyní otevřete software ve vašem počítači. Klikněte na *Nastavení*, poté na *Můj profil* a nakonec na *Spustit synchronizaci*.

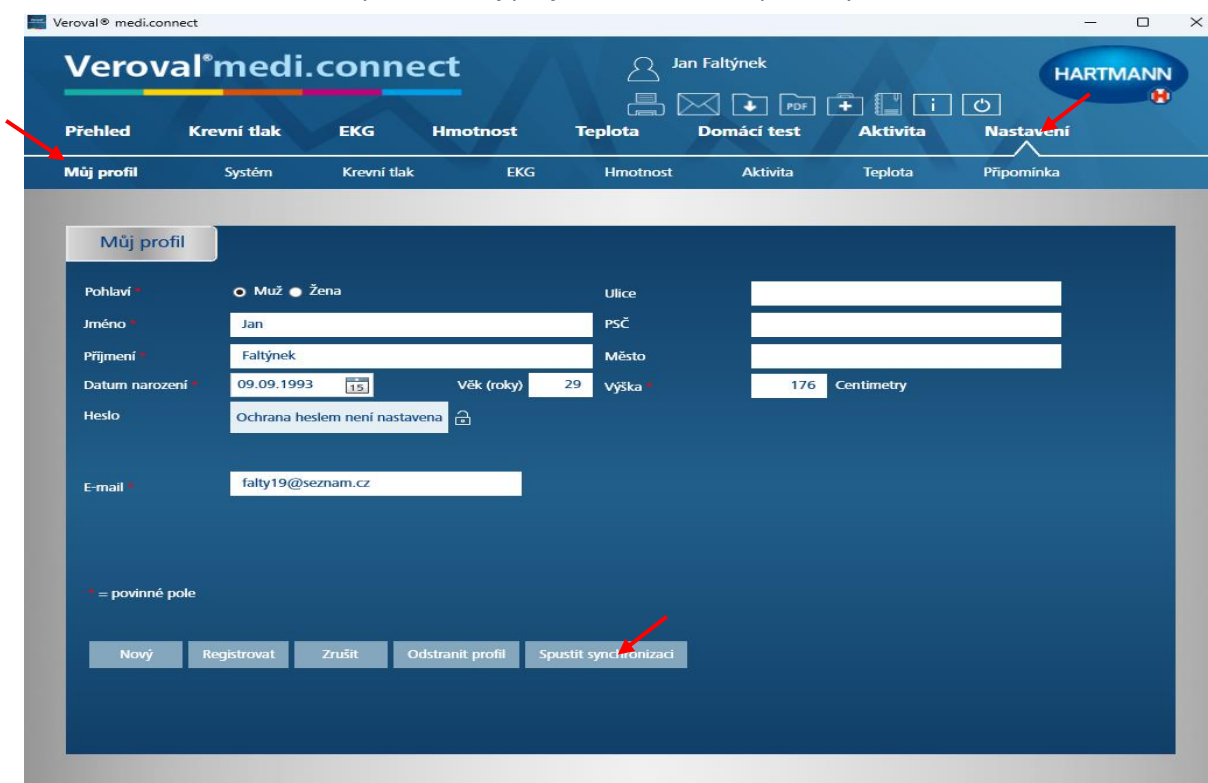


- Po provedení synchronizace se vaše data zobrazí ve vašem chytrém telefonu/tabletu. Pokud se vaše data v aplikaci nezobrazují, doporučujeme aplikaci zavřít a znovu otevřít. Kromě toho ověřte, že váš chytrý telefon / tablet má stabilní připojení k internetu.

2. Data můžete synchronizovat z chytrého telefonu nebo tabletu do počítače.



- Otevřete software Veroval® medi.connect ve vašem počítači.
- Klikněte na *Nastavení* a poté na *Můj profil*
- Klikněte na *Spustit synchronizaci*

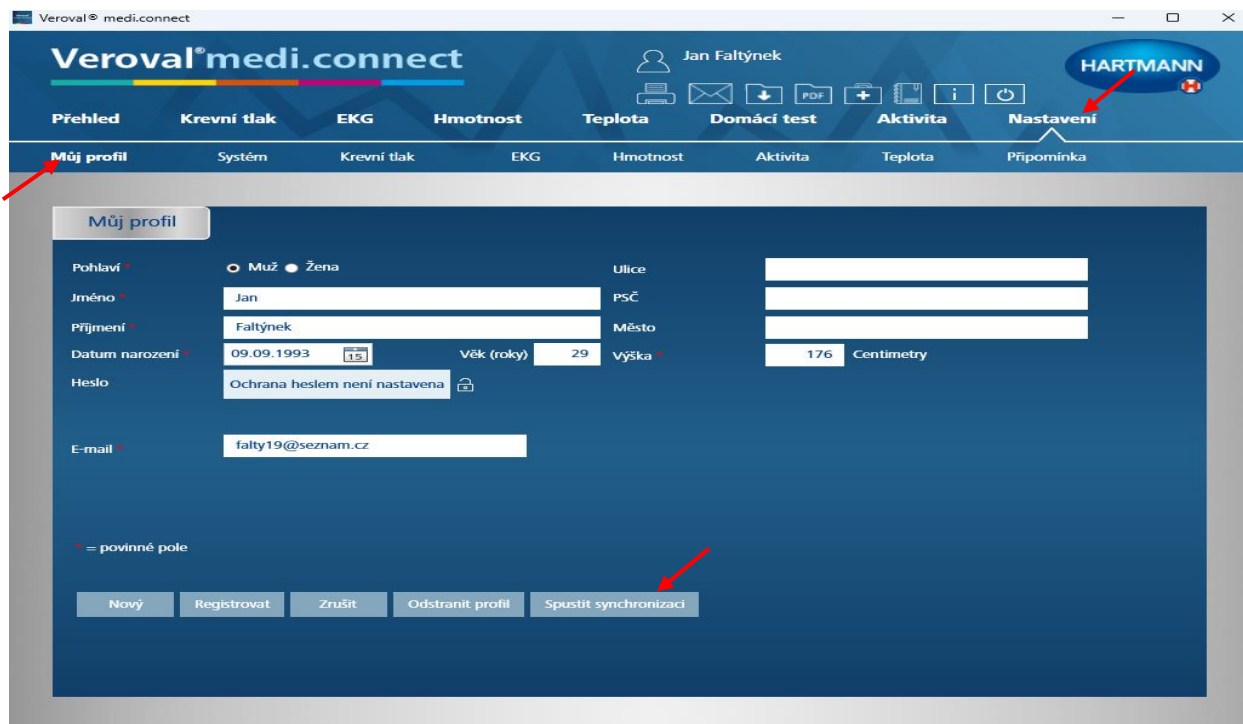

- Vaše data budou synchronizována a zobrazena v softwaru.

Upozorňujeme, že kvůli chybějícímu integrovanému Bluetooth není **v současné době možný přímý přenos dat** do aplikace z následujících tlakoměrů: Veroval® duo control, Veroval® na paži, Veroval® na zápěstí a Veroval® compact.